


CÁMARA INTRAORAL

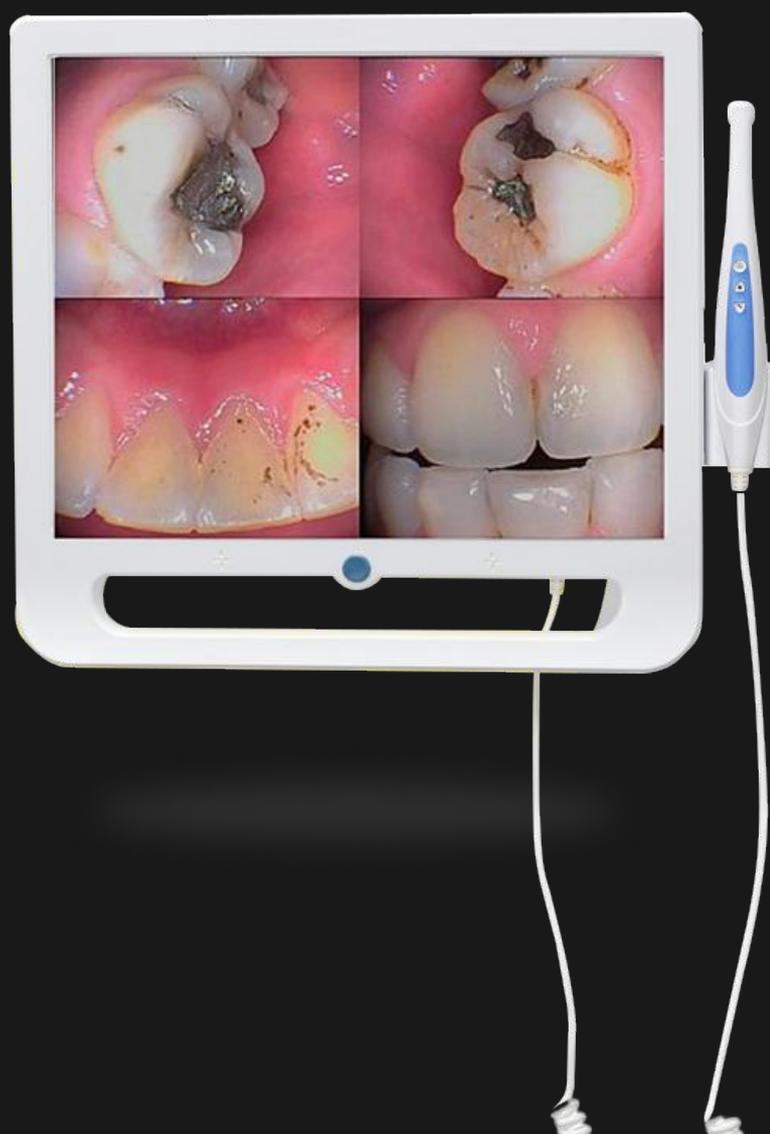



- 1 Botón de encendido
- 2 Luz indicadora y recepción del control remoto
- 3 Mango para cámara intraoral

Botones de la cámara intraoral



Congelar / Liberar

Presione el botón para tomar una fotografía

Presione este botón para ingresar al modo de fotografía en modo de visualización.



Volver / Borrar

Presione este botón para ingresar al modo de visualización para ver las fotos tomadas anteriormente; seleccione la foto que desea eliminar, presione y mantenga presionado este botón hasta que aparezcan sugerencias de eliminación y presiónelo nuevamente para eliminar la foto.



Siguiente / Transición de pantalla de 1/4

Cuando se presiona este botón, la imagen del monitor puede cambiar entre el modo de imagen única y el modo de 4 divisiones. En el modo de visualización, presione este botón para ver las páginas siguientes. Puede aparecer un código QR si se mantiene presionado y luego el teléfono móvil puede conectarse al WiFi del host para capturar las fotos después de escanear el código.

Cómo usar el WIFI y código QR

- 1 Abra la función de configuración wifi del teléfono móvil, conéctese a la señal con el nombre que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla, la contraseña es 12345678
- 2 Ingresa al modo de exploración de fotos, selecciona la foto que deseas guardar en el teléfono y mantén presionado el botón  hasta que aparezca el código QR en la pantalla.
- 3 Para ver la foto después de escanear el código QR con el navegador móvil, guárdela después de presionar durante unos segundos.

Parámetros técnicos

Tamaño de pantalla: 17 pulgadas

Voltaje: AC100-220V, 50/60Hz

Resolución: Ultra HD

Rango de enfoque: 20-50mm

Tipo de enfoque: enfoque fijo de 2 cm.

Ángulo de visión: 90°

Cámara: 1/4 SONY HAD CCD

Fuente de luz: 6 luces LED (Luz blanca)

Señal: NTSC/PAL

Almacenamiento de imagen: Disco U

 *Envíos a todo México*

 *1 año de garantía*

Dirección

Calzada de Tlalpan 564, 2do Piso, Colonia Moderna
Benito Juárez, 03510 CDMX

WhatsApp

55 8171 0063

Oficinas

55 5440 3889

Redes Sociales

Fb: Laboratorios Gayz
Ig: @laboratoriosgayz
Tk: @laboratoriosgayz

